

寶貝詳情敘述:

需营造健康的感觉, 可用白, 蓝, 橘, 灰...色调, 且人物图片要以外国人为主

[产品标题] 托玛琳自发热保暖透气护腰带


[产品图片]



[产品尺寸规格]

商品名称	托玛琳自发热保暖透气护腰带
产品材质	高档进口面料 医用能量磁石 平面创新魔术贴 辅助弹力带
产品尺寸规格	S：1尺8寸-2尺3寸 M：2尺3寸-2尺7寸 L：2尺7寸-3尺2寸
适用族群	腰肌劳损，坐骨神经痛，骨质增生，长期久坐上班族，经常搬重物族群，中老年人日常保健
安全认证	绝不使用防腐剂，增白剂等化学药剂，通过敏感肌肤测试
清洗方法	清水手洗，自然晾干，切勿浸泡与日晒

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

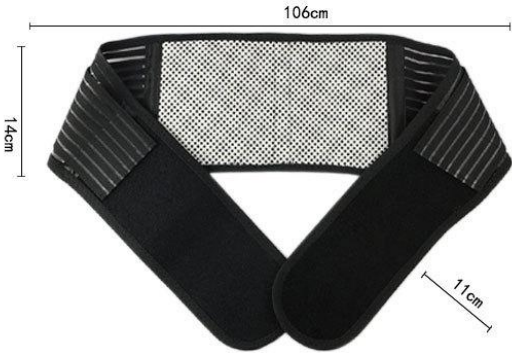

- 面料

弹力透气
- 颜色

黑色
- 特点

1. 高档进口面料，散热透气性强，不闷热 2. 医用能量石，健康腰部。有效保护脊柱，根据需要选择佩戴，四季兼用。3. 平面式创新魔术贴，横向黏力更强，佩戴更便捷。4. 新增辅助弹力带，超强透气，超强弹力，束腰效果更好。
- 功效

适用于腰疼、风湿、坐骨神经痛、腰肌劳损、骨质增生寒性腰疼、关节炎、胃肠道不适、月经不调、腰椎增生等。
- 适用

上述腰部问题患者；白领、司机、学生等久坐人群；教师、商场导购等久站人群；腰部术后康复理疗者、中老年人的日常养生保健。
- 安全配方

绝不使用防腐剂、杀菌剂、增白剂等化学药剂
- 安全检查

通过敏感肌肤测试，PH值亲肤检测，获得欧盟生态纺织品标准认证

## [消费者问题]

检视你是否有玻璃腰？



你是否有這樣的困擾？

上班族久坐腰疼？经常搬重物腰肌劳损？运动时腰部扭伤？

慢性腰椎压迫，骨质增生？坐骨神经痛？天冷时就感觉腰痛？

→可参考如下图片，进行修改版面，照片全部更换，问题环绕着拿放大镜的小孩



## 您的腰部还在痛吗？


空调房，阴雨天，运动拉伤，腰部问题也接踵而来



## 腰部问题 一步到位

Regardless of the waist, just as the same principle, it is important for the waist to be flexible. With the development of science and technology, to protect the waist of the body, it is necessary to use the most scientific and effective method to protect the waist.

您要的是一款好护腰

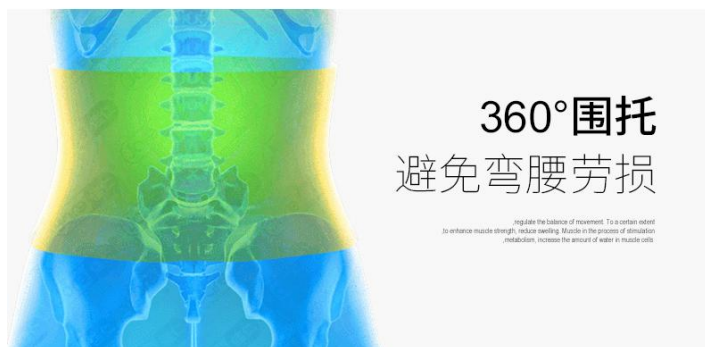

## [功能展示]

### 护腰的功用→用 icon 的方式介绍

对肌肉施加一定压力，调节运动受力平衡，护腰能够在运动过程中提供一定的支撑力，能量磁石也能提供热敷的效果，能维持腰部温度，促进血液循环

- 1- 升级加宽设计
- 2- 进口防过敏材质
- 3- 增强型自黏扣设计
- 4- 专业医用能量磁石设计
- 5- 360 度腰部贴合
- 6- 加压
- 7- 支撑
- 8- 保暖

能够有效维护腰部温度，加快血液循环。



拥有一条 轻松过冬

本产品具有配带方便、安全，节能，效果好的特点

- 1.刺激穴位，疏通经络，促进身体新陈代谢；
- 2.缓解身体局部疲劳与疼痛；

本品主要原料电气石粉、锗粉等，结合中国传统中医药热灸理论，采用国际上最先进工艺凝结为高分子能量反应堆，产生热电和压电效应，释放大量对人体有益健康的负离子、远红外线、磁能、等多种复合热能，透过人体皮肤，在人体的深处产生生物效应，从而达到保健的目的。

**磁疗**——内置多颗高穿透永久健康磁石产生的强大磁场，由于生物磁性材料的磁力线作用，使腰部周围形成磁场（无电磁波辐射），透过生物磁波不断的扩散及刺激，可对人体肌肤进行微按摩，如同中医针灸对穴位进行针刺刺激一样，可增加细胞活力，改善血液循环。

**热疗**——是由自然能康体热灸布复合而成,自然能康体热灸布是纳米生物复合材料制成的高新技术产品。自发热系列采用纳米远红外和白金磁技术，与无纺布结合而成，它通过吸收外界能量和人体自然热能不断释放出远红外线与更强的白金磁，能渗透皮肤及皮下组织，与细胞中的气血产生共振吸收效应，加强血管内活性物质的释放。

## 【适用范围】

适用于腰痛、坐骨神经痛、腰肌劳损、寒性腰痛，由腰椎增生，腰间盘突出引起的疼痛，身体畏寒怕冷者，腰部寒冷疼痛、日常保健等。

### 1.日常保健：

直接将护腰的自发热部分(即有圆点部分)贴合腰部固定。远红外、磁疗及自发热热灸功能即可逐渐生效，同时腰部皮肤会逐渐产生轻微的温热感和针刺感。

### 2.快速高温热灸理疗：

将护腰的自发热部分用水完全抹湿（冬季可用温水），然后将其紧紧贴合于腰部皮肤处固定，一般 15-30 分钟左右即可感觉到明显的温热感。**请根据您的皮肤感受决定配戴时间的长短，如感觉热度过高或针灸感强烈，请暂时摘下，不可强忍。**使用后皮肤仍持续有些微灼热感觉，属正常情况，会逐渐自行消失。并不需要每次都沾水使用。平常可不沾水直接使用，并不影响远红外、磁疗、磁灸等保健功效的正常发挥。随着使用次数的增加，由于人体对高热及针刺感的逐渐适应，会逐渐感觉灼热和针刺感较最初会有所减弱。

## [细节展示]



面料 給予肌膚清爽舒適的穿著體驗  
強力支撐！透氣！



本腰带带身是美国进口高弹力带，还可以有一定的拉伸。左右两边约 30 厘米长的尼龙搭扣粘合固定，适用腰围有很大的可调节度。

### <材质>

**外层：**前部超软绒毛状自粘布、美国进口高弹力带，软性皮革布,弹力好，手感丰满，穿着舒适，自粘式方便穿戴，粘贴牢固，不变形。

**中间层：**镶嵌磁片层（每个护腰前面有 8 枚永久健康磁石片针对胃部，后面有 10 枚永久健康磁石片针对腰部）

**内层：**用最新研究的高科技纳米技术提取多种宝石级矿物纳米精粉，结合中国传统中医药热灸理论，采用国际上最先进工艺凝结为高分子能量反应堆复合而成的负离子远红外布层。



# 加倍用心 加倍信赖

DOUBLE DOUBLE TRUST WITH YOUR HEART

我们专注于每一个细节



## 1 MAGIC

### 魔术粘贴扣

MAGIC PASTE BUTTON

独家新型射出钩，全新排列设计，具有超强横向拉力，简单方便佩戴，反复粘贴不起毛，使用寿命增加一倍不止



## 2 MAGIC

### 均匀车载线

MAGIC PASTE BUTTON

采用进口布线锁边，均匀紧密的踩线，全方位掌控每一个细节，精细耐用，不易脱线，追求卓越品质。



## 3 MAGIC

### 皮制面料

MAGIC PASTE BUTTON

具有极似真皮微细组织纤维结构的特质，且有质轻，柔软，防水，富有真皮的手感，不单是一种环保材料，更无菌，无毒



## 4 MAGIC

### 绷带面料

MAGIC PASTE BUTTON

可以有效增加腰部支撑力度，并可根据每个人腰部需要自由调节力度大小

需简化这四个细节


## [建议运动]

→一个动作搭配一个说明

跟着康复治疗师 身体动一动

减缓腰疼 强化腰力

- 1- 婴儿姿运动：俯卧，用手掌撑地面，身体往后推进，并将屁股坐在脚踝上，伸展放松整个背部肌群，一天重复 10 次
- 2- 腰部核心强化：俯卧，用手掌撑地面，慢慢将右脚抬起，若可以再将左手抬起，停住 10 秒，换抬起左脚和右手，一天来回重复 10 次
- 3- 背部强化：俯卧，手掌手肘贴地，手肘贴地将身体撑起，停住 10 秒，一天来回重复 10 次
- 4- 背部强化：仰卧，将双脚屈曲，用力将屁股抬离地面，身体呈一直线，停住 10 秒，一天来回重复 10 次
- 5- 伸展两侧腰部：仰卧，双手平贴於地面，双脚屈曲，先将双脚倒卧於左侧，同时脸部可转向右侧，停住 10 秒，再将双脚倒卧右侧，脸朝向左侧，停住 10 秒，一天来回重复 10 次

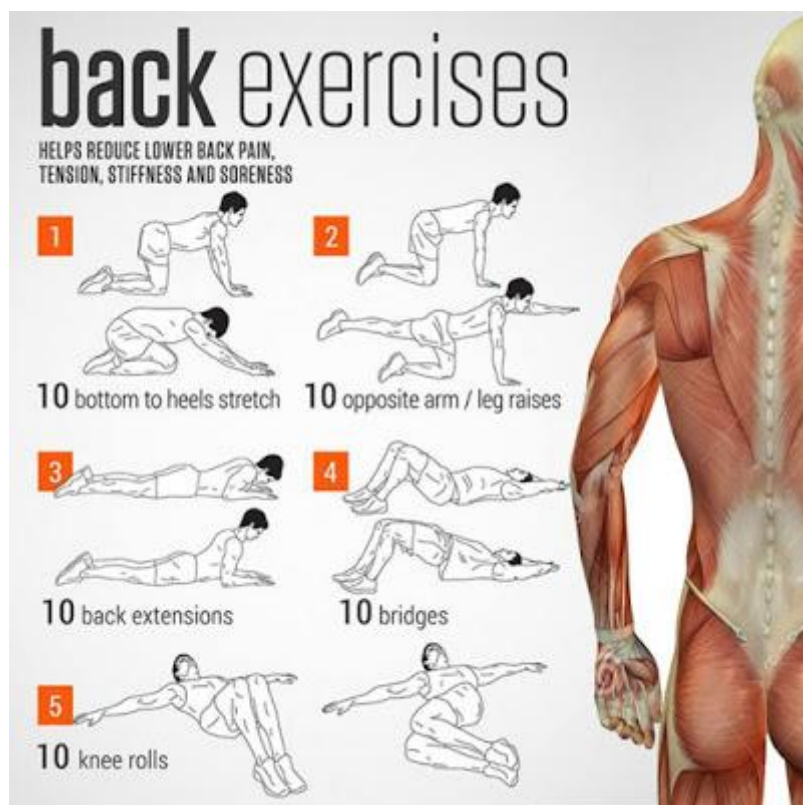

[购物须知]

→仿照下面的方式，进行排版，有一致性



特别注意：

- （1）如果要快速使用高热功效，必须要将发热层面用水完全抹湿，且一定要紧贴皮肤固定；
- （2）自发热功效是通过激活人体体内细胞活力和局部血液循环，促使人体自身发热，是一种由内而外的热表现，而并非靠外部热量烘烤皮肤表层，因此护腰本身是不热的。

【洗涤方法】

本产品可重复洗涤使用，避免使用洗涤剂（粉），直接用清水刷洗（勿直接侵入水中）即可。

【慎用范围】

- 1、慢性传染病。
- 2、慢性心、脑、肾功能不全者。
- 3、癌症患者。
- 4、妊娠期妇女
- 5、其它特殊情况
- 6、个别过敏体质者请在医生的指导下使用

【禁忌症】

- 1、出血性疾病及有出血倾向者
- 2、急性传染病和高烧患者
- 3、急性重症、心、脑、肾功能不全者
- 4、甲状腺功能亢进患者
- 5、术后或急性外伤 48 小时内
- 6、装有心脏起搏器者
- 7、温度感觉障碍及佩戴部位皮肤破损者
- 8、孕妇及儿童不宜使用

注：如局部出现发红、灼热属于正常现象，产品取下后现象自然消失。